

SISTEMA ÚNICO DE RF RESISTIVA REAL.

El equipo BIMAX (Bipolar Real) cuenta con 2 emisores de R.F. y un receptor en su cabezal facial y se duplica en su cabezal corporal.

A través de su emisión continuo o pulsante, permite al profesional lograr la temperatura adecuada para cada tratamiento.

La emisión de los equipos Noto generan la temperatura necesaria para calentar las capas subcutáneas y la matriz extracelular, donde las fibras de colágeno y elastina se encuentran incrustadas. El equipo BIMAX genera así tratamientos eficaces y seguros con resultados inmediatos y duraderos en la firmeza y tensado de la piel, la definición del contorno del rostro, etc.

Su aplicación también mejora el aspecto del P.E.F.E., debido a que los tejidos grasos ejercen mayor resistencia al pasaje eléctrico.





Con el lanzamiento de la línea N de NOTO se plantea un rumbo diferente, donde la combinación de terapias, la incorporación de tecnología de vanguardia y la utilización de materiales y productos de primera calidad son requisitos en la obtención de resultados visibles, efectivos y duraderos.


¿CÓMO FUNCIONA ESTE NOVEDOSO SISTEMA?.

Debido a la cantidad y ubicación de sus emisores conjuntamente con el receptor, ambos realizados en acero quirúrgico inoxidable, se obtiene una mayor concentración de potencia y energía focalizada en la zona de aplicación deseada. Al poseer emisión de campos cruzados, desarrollada por NOTO, los niveles de temperatura alcanzan entre los 55 y 58°C en profundidad. Esta focalización de energía logra una contracción inmediata de las fibras de colágeno y elastina, aumentando su desnaturalización. La temperatura alcanza a nivel superficial entre 36° y 42° C

BIMAX

BIMAX 2 EMISORES 1 RECEPTOR.

FΔCIΔI

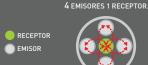

CORPORAL -







luminosa que el circuito electrodo-paciente se ha cerrado correctamente y que el equipo está emitiendo la corriente programada en forma correcta. Esto le permite al profesional tener la certeza de que el tratamiento se está realizando en forma segura.

BIMAX

CANTIDAD DE EMISORES: CANTIDAD DE RECEPTORES:

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD.


de emisión y horas de uso, entre otras posibilidades.



BIMAX EQUIPO IPX 0
DIIVIAA EQUIPUIPAU

FABRICADO POR:	NOTO GROUP S.A.	BIMA
PAÍS:	ARGENTINA	CAN
NOMBRE DEL PRODUCTO:	BIMAX	CAN
ANCHO:	350 MM	Nota:
LONGITUD:	310 MM	
ALTURA:	160 MM	
PESO:	4.6 KG.	
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	98 A 240 VAC 50/60HZ	
CONSUMO:	90 VA	
POTENCIA:	60 WATT (CORPORAL) Y 30 WAT	T (FACIAL)
FUSIBLE:	1 AMPER CORTE RÁPIDO	
FUNCIONAMIENTO:	MICROCONTROLADOR	
FRECUENCIA:	1 MHZ +/- 10%	
PANTALLA :	GRAFICA TÁCTIL DE 128X64	.
FUENTE:	SWITCHING INTERNA	
TECNOLOGÍA:	SMD	
CONTROL DE TIEMPO:	POR PROGRAMA	
FUSIBLE DE ENTRADA TIPO:	F 1.5 AL 250 V	•
FUSIBLE DE ENTRADA EMISOR:	F 1 AL 250 V	Į



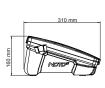

1

Nota: las especificaciones del equipo pueden variar sin previo aviso

Noto respalda a todos sus clientes con un conjunto de herramientas disponibles en todo momento. Herramientas que van desde el servicio técnico y de post venta hasta nuestros cursos de tratamientos y apoyo en marketing. Todo esto con el objetivo de lograr que los equipos Noto sean siempre su mejor opción.

OTROS EQUIPOS DE LA LINEA N DE NOTO:

TRIMAX - RADIOFRECUENCIA RESISTIVO TRIPOLAR. N 1800 - ELECTROPORACIÓN DE ALTA POTENCIA + MICRODERMOABRASIÓN.

