

N 1104 PROGRESSIVE

ELECTROTERAPIA

O. RUSAS + O. CUADRADAS + T.E.N.S.



2 AÑOS DE GARANTÍA
+CAPACITACIÓN

TECNOLOGÍA DE PUNTA
EQUIPO PROFESIONAL

- EQUIPO BIFÁSICO
- 4 CANALES INDEPENDIENTES
- 1 CONTROL DE POTENCIA POR CANAL

- PANTALLA DIGITAL
- ARRANQUE Y FINALIZACIÓN EN RAMPA
- ELECTRODOS 100% CONDUCTIVOS

EL EQUIPO MÁS MODERNO DEL MERCADO.

Esta exitosa línea de equipos se renueva para ofrecerle más opciones y prestaciones. El N1104 PROGRESSIVE es 100% digital, bifásico y cuenta con 4 canales con 4 salidas totalmente independientes, un transformador de aislación independiente por cada canal, arranque y finalización en rampa. Todo esto con el fin de lograr equipos más seguros y confiables.

Además de poder variar todos los parámetros en el momento que desee, el N 1104 PROGRESSIVE cuenta con 34 programas preestablecidos sumado a 21 programas libres para generar sus propios parámetros y almacenarlos en sus memorias.

Se presenta en gabinete metálico, con una pantalla de 20 x 4 segmentos.

TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA.

Su tecnología, al igual que toda la desarrollada por NOTO está basada en la microelectrónica, tecnología que le confiere al equipo excelentes prestaciones de uso y confiabilidad además de otorgarle mayor seguridad para el paciente y durabilidad por muchos años.

UN EQUIPO DIFERENTE.

Cabe mencionar también otros detalles no menos atractivos que lo diferencian del resto de los equipos existentes en el mercado: su gabinete enteramente metálico con un acabado que lo hace único, su manejo 100% digital que le brinda al usuario una mejor experiencia en el uso del mismo.

¡BIENVENIDO A LA TECNOLOGÍA! BIENVENIDO A NOTO.

NOTO
LA DIFERENCIA DE SER ÚNICO

Con el lanzamiento de la línea N de NOTO se plantea un rumbo diferente para el mercado de la estética, un nuevo escenario en donde la combinación de terapias, la incorporación de tecnología de punta y la utilización de materiales y productos de primera calidad son fundamentales para la obtención de resultados visibles, efectivos y duraderos.

ONDAS RUSAS

Se trata de corrientes de media frecuencia modulada en señales de baja frecuencia. Su frecuencia media tiene como objetivo la disminución de la resistencia o impedancia cutánea, permitiendo que la de baja frecuencia actúe sobre la musculatura. El objetivo de estas corrientes se centra en la tonificación muscular o en la modelación de los contornos corporales.

T.E.N.S.

Los programas T.E.N.S. utilizan los mecanismos propios del sistema nervioso central para aplacar los dolores crónicos y agudos. La ventaja principal de aplicar ondas T.E.N.S. es la disminución del dolor, generando un alivio de forma inmediata y sin efectos colaterales.

ONDAS CUADRADAS.

Se presentan en forma de pulsos de baja y media frecuencia. Las ondas cuadradas son las más energéticas de las corrientes rítmicas.

PRINCIPALES INDICACIONES:

- Flaccidez y modelación de contornos musculares.
- Levantamiento e hipertrofia de glúteos.
- Hipertrofia muscular progresiva.
- Atrofia por desuso.
- Fortalecimiento en procesos pos quirúrgicos.
- Rehabilitación deportiva.

PRINCIPALES INDICACIONES:

- Lesiones de los nervios periféricos.
- Lesiones de compresión nerviosa y distrofia simpática refleja (síndrome del túnel carpiano).
- Dolor del muñón y/o dolor fantasma de miembros.
- Neuralgia post herpética.
- Dolor de espalda y cuello

PRINCIPALES INDICACIONES:

- Entrenamiento funcional.
- Deportología.
- Modelación.
- Firmeza muscular.
- Tonificación.
- Drenaje linfático.
- Fortalecimiento.
- Modelación corporal.
- Fuerza y Resistencia.

EL EQUIPO N 1104 PROGRESSIVE CUENTA CON:



4 Electrodes GRANDES



4 Electrodes CHICOS



6 Bandas elásticas



4 Cables conectores



1 Manual de uso


DATOS TÉCNICOS N 1104 PROGRESSIVE:

FABRICADO POR:	NOTO GROUP S.A.
PAÍS:	ARGENTINA
NOMBRE DEL PRODUCTO:	N 1104 PROGRESSIVE
ANCHO:	185 MM
LONGITUD:	260 MM
ALTURA:	130 MM-75 MM
PESO:	2,1 KG
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	98 A 240 VAC 50/60HZ
POTENCIA:	21 WATT
FUSIBLE:	1 AMPER CORTE RÁPIDO
FUNCIONAMIENTO:	MICROCONTROLADOR
FORMAS DE ONDA:	ONDAS RUSAS, T.E.N.S Y CUADRAS
AMPLITUD DE PULSO:	0 A 90 MA . IMPEDANCIA 1K
CANTIDAD DE CANALES:	4 CORPORALES INDEPENDIENTES AISLADOS +1 FACIAL

FRECUENCIA PORTADORA 2500 HZ. ONDAS RUSAS.

PROGRAMAS:	26 PREESTABLECIDOS
TEMPORIZADOR (TIEMPO):	1 A 30 MINUTOS
CONTRACCIÓN:	2 A 15 SEGUNDOS
PAUSA:	2 A 50 SEGUNDOS
FRECUENCIA:	2 A 150 HZ
RELACIÓN:	1:1, 2:1 4:1
RAMPA DE ASCENSO:	1 SEGUNDO
RAMPA DE DESCENSO:	1 SEGUNDO
SECUENCIAS:	1,2,3,4

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

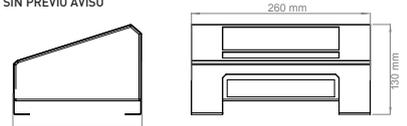

Noto respalda a todos sus clientes con un conjunto de herramientas disponibles en todo momento. Herramientas que van desde el servicio técnico y de post venta hasta nuestros cursos de tratamientos y apoyo en marketing. Todo esto con el objetivo de lograr que los equipos Noto sean siempre su mejor opción.

OTROS EQUIPOS DE LA LINEA N DE NOTO:

- N 1800 - MICRODERMOABRASIÓN + ELECTROPORACIÓN CON SISTEMA "ID".
- N 1400 - MICRODERMOABRASIÓN.

